

**Opis topomera**

- ① Dugme ON/OFF (uključi/isključi)
② Ekran
③ Poklopac za deljak sa baterijama
④ Senzor za merenje
⑤ Površina za čišćenje i dezinfekciju (samo sonda termometra)

SR

Dodata na opreme medicinskog sredstva

Baterija: 1 x LR41

Opcioni pribor

Navlaka za sondu za jednokratnu upotrebu za higijensko merenje: Microlife navlaka za sondu za digitalni termometar su dostupne kao pribor. Za merenje koristite navlaku za sondu koju se kompatibilne sa sredstvom kako biste izbegli unakrsnu kontaminaciju između merenja i pacijentom. Upotreba nekompatibilne navlake za sondu sa sredstvom može da utiče na tačnost merenja.

Postavljanje općine navlake za sondu:

Dobro umetnite termometer u navlaku za sondu i uklonite zaštitni sloj navlake za sondu. Po završetku merenja, uklopite korisnu navlaku za sondu i odložite je u skladu sa važećim lokalnim propisima.

Oprez: Navlaku za sondu NE koristite ponovo. Navlaka za sondu je namenjena samo za jednokratnu upotrebu kako bi se spričala unakrsna kontaminacija sredstva između merenja.

Instalacija i postavljanje medicinskog sredstva

Baterija je unapred postavljena u medicinsko sredstvo. Kada se oznaka ispravljene baterije (■) pojavi na ekranu, baterija je prazna i potrebno je da se zameni. Uklonite poklopac deljaka za bateriju (3) sa termometra pomoću odgovarajućeg instrumenta. Postavite novu bateriju tako da znak + bude na vrhu.

NAPOMENA:

Vodite računa da vam ista nova baterija bude pri ruci. LR41 baterija se može kupiti u bilo kojoj prodavnici električne opreme. Držite bateriju dalje od dece/beba.

Ovaj dokument sadrži važne bezbednosne informacije, kao i informacije o načinu rada uređaja. Detaljno pročitajte ovaj dokument pre upotrebe uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.

Važne informacije**Opis uređaja**

Digitalni termometar je medicinsko sredstvo koje koristi princip provodnog topoljnog ekvivalenta između kontakta sredstva i tela i digitalnom obradu signala da bi izračunao i obezbedio merenje telesne temperature.

Namena

Sredstvo je namenjeno za merenje telesne temperature.

Predviđeni korisnik

Predviđeno je da medicinskim sredstvom rukuju odrasli i adolescenti sa adekvatnim vidom, motoričkim funkcijama i obrazovanjem, sposobni da razumeju uputstva za upotrebu i rukuju ubičajenim električnim aparatima za domaćinstvo.

Predviđeni pacijent

Predviđeni pacijenti su opšta populacija svih uzrasta.

Predviđeno okruženje i uslovni upotrebe

Medicinsko sredstvo je namenjeno za upotrebu u kućnom zdravstvenom okruženju (npr. ubičajeno domaćinstvo bez medicinski obučenog osoblja) od strane pacijenta (npr. za samostalno merenje) ili negovatelja, kao i u zdravstvenim ustanovama (npr. u lekarskoj ordinaciji).

Indikacije

Ovo medicinsko sredstvo meri telesnu temperaturu za sledeće indikacije:

- Skrining za bolesti i stanja povezana sa povišenom ili niskom telesnom temperaturom.

Kontraindikacije

- Sredstvo nije pogodno za upotrebu na mestima sa oštećenom ili ugroženom kožom.
- Ne pokušavajte rektalna merenja kod osoba sa rektalnim poremećajima.

UPOZORENJE!

NAPOMENA: Stavke upozorenja ukazuju na potencijalno opasne situacije, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do smrti, kritične ili teške povrede korisnika ili pacijenta.

- Ovo sredstvo se može koristiti isključivo u svrhe koje su opisane u ovom priručniku sa uputstvima. Proizvođač nije odgovoran za štetu izazvanu nepravilnom upotrebnom.

• Rezultat merenja ovog medicinskog sredstva nije medicinska dijagnoza i nije namenjen da zameni konsultaciju sa kvalifikovanim zdravstvenim radnikom i njegovu dijagnozom (npr. lekar, farmaceut ili drugi licencirani zdravstveni radnici). Ne koristite ovo medicinsko sredstvo za samostalnu dijagnozu ili samostalno lečenje zdravstvenog stanja. Odmah potražite savet od zdravstvenog radnika ako se pacijent očigledno oseća loše ili ima fiziološke ili medicinske simptome.

• Ovaj proizvod sadrži dugmaston bateriju. Ako se pruga, dugmaston baterija može da izazove unutrašnje hemijske opekotine za samo dva sata i da doveđe do smrtnog ishoda. Odmah odložite iskorisćenu bateriju. Držite nove i korišćene baterije dalje od dece. Ako mislite da postoji mogućnost da ste prugotili bateriju ili da se ona nalazi u bilo kom delu tela, odmah potražite medicinsku pompu.

• Ne pokušavajte da merite temperaturu na mestima na telu koja nisu navedena u ovom uputstvu.

• Obvezno da deca ne koriste ovaj uređaj bez nadzora; pojedini delovi su dovoljno mali da mogu biti prugotili.

• Ne hodajte i ne trčite prilikom merenja temperature.

• Iz bezbednosnih razloga (rizik od rektalne perforacije), rektalno merenje kod dece mlađe od 3 godina mora da obavlja samo obučeno zdravstveno osoblje (profesionalni korisnik). Umesto toga koristite drugu metodu merenja. Za rektalno merenje ušed groznice kod male dece, mlađe od 3 godina, dostupni su termometri sa fleksibilnom sondom.

• Profesionalni korisnici moraju da se pridržavaju važećih propisa o medicinskim sredstvima u svojoj zemlji.

Oprez

NAPOMENA: Stavke opreza ukazuju na potencijalno opasne situacije, koje, ako se ne izbegnu, mogu dovesti do manjih ili zanemarljivih povreda korisnika ili pacijenta, ili oštećenja imovine ili ugroženosti životne sredine.

• Ako postoji uticaj na temperaturu pacijenta (npr. inkubator, električna čeba), rezultat merenja koji dođe ovo sredstvo se ne sme koristiti za utvrđivanje prisutnosti/odustupa groznice.

• Preporučuje se upotreba kompatibilne navlake za sondu ili čišćenje i/ili dezinfekcija sredstva pre/posle merenja kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija između korisnika i pacijentata.

• Nemajte gristi, žvakati ili savijati sondu sredstva više od 45°.

• Nemajte koristiti uređaj ukoliko mislite da je oštećen ili primećite nešto neobično.

Informacije o elektromagnetskoj kompatibilnosti

• Sredstvo je u skladu sa standardom koji se odnosi na elektromagnetske smetnje EN 60601-1-2.

Dodata dokumentacija u skladu sa ovim EMC standardom je dostupna od strane kompanije Microlife na adresi www.microlife.com/electro-magnetic-compatibility.

• Nemajte koristiti sredstvo u blizini jakih elektromagnetskih polja i prenosivih uređaja za radiofrekvenčku komunikaciju (npr.

Odlaganje

Ovo sredstvo predstavlja medicinsku električnu opremu. Odložite ovo medicinsko sredstvo i baterije u skladu sa direktivom o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE) i važećim lokalnim propisima. NEMOJTE odlagati medicinsko sredstvo i baterije sa kućnim ili komercijalnim otpadom.

NAPOMENA: Zadržavamo pravo na tehničke izmene.

Garancija

Ovaj uređaj je pokrivен doživotnom garancijom od datuma kupovine. Tokom ovog garantnog perioda Microlife će, u skladu sa procenom, popraviti ili zamjeniti neispravne proizvode bez naplate troškova.

Otvaranje ili prepravljanje aparat-a čini garanciju nevažećom.

Sledeće stavke nisu obuhvaćene garancijom:

- Troškovi transporta i rizik od transporta.
- Oštećenja izazvana neadekvatnom upotrebo ili nepridržavanjem uputstva za upotrebu.
- Oštećenja izazvana nezgodama ili nepravilnom upotrebo.
- Materijal za pakovanje/skladištenje i uputstvo za upotrebu.
- Redovne proveru i održavanje (kalibracija).
- Dodaci i prenosivi delovi: Baterije.

U slučaju da je potreban servis u garantnom roku, kontaktirajte prodajno mesto na kome ste kupili proizvod ili lokalni Microlife servis. Možete kontaktirati uvažljiv lokalni Microlife servis putem našeg web sajta: www.microlife.com/support

Kompresija je ograničena na vrednost proizvoda. Garancija će biti uvažena ako se vrati kompletan proizvod sa originalnim računom.

Popravka ili zamena u garantnom roku ne proizvodi niti obnavlja garantni period.

Specifikacije i usaglašenost**Tehničke specifikacije**

Naziv sredstva: Digitalni termometar

Kataloški broj: MT 600

Broj modela: MT16Z1

Režim rada: Direktni režim

Mesto merenja: Sublingvalno, rektalno ili aksilarno

Raspon merenja: 32 °C do 43,9 °C

Temp. < 32 °C: prikazuje „L“ za niske (suvješne niske)

Temp. > 43,9 °C: prikazuje „H“ za visoke (suvješne visoke)

Tačnost merenja (Laboratorijska):

± 0,1 °C; 34 °C - 42 °C

± 0,2 °C; 32,0 - 33,9 °C i 42,1 - 43,9 °C

10 - 40 °C

15-90 % relativna maksimalna vlažnost

Atmosferski pritisak 700 - 1060 hPa

-25 - +55 °C

15-90 % relativna maksimalna vlažnost

Atmosferski pritisak 700 - 1060 hPa

LR41 (1,5V) / SR41 (1,55V)

približno 4500 merenja (kada koristite novu bateriju)

IP67: Otporno na prašinu. Zaštićeno od efekata privremenog potapanja u vodu.

126±0,5 x 18,6±0,3 x 10,8±0,3 mm

Približno 11±0,5 g (uključujući baterije)

Očekivani vek trajanja: 5 godina ili 10000 merenja, koje god nastupi ranije.

Ovaj aparat usklađen je sa zahtevima Direktive 93/42/EEC za medicinska sredstva.

Informacije o usaglašenosti

Ovo medicinsko sredstvo je u skladu sa zahtevima Uredbe o medicinskim sredstvima (EU)2017/745.

Usaglašeno sa standardima:

EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-1-11; EN ISO 80601-2-56

Simboli i definicije

Pre upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo.

Držati van domaća dece

Tip BF

Upozorenje

Medicinsko sredstvo

Kataloški broj

Broj modela

Broj lota (GGGG-MM-DD; godina-mesec-dan)

Proizvođač

Zemlja proizvodnje (Datum proizvodnje ako je datum odštampan pored simbola)

CE oznaka usklađenosti

Ovlašćeni predstavnik za Evropsku uniju

Ograničenje temperature za rad ili skladištenje

Ograničenje vlažnosti za rad ili skladištenje

Odložite u skladu sa uredbom o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE).

Uvoznički

Jedinstveni identifikator uređaja

Držite van domaća sunčeve svetlosti

Samo za jednokratnu upotrebu

Veb lokacija sa informacijama o pacijentu

Nije izradeno od prirodнog gumenog lateksa

Čuvati na suvom

IP67: Otporno na prašinu. Zaštićeno od efekata privremenog potapanja u vodu.

Ovlašćeni predstavnik:

R&B MEDICAL Company doo

Bulevar oslobođenja 159

Beograd, Srbija

Tel/Fax: 011-408-3207

Broj Rešenja o registraciji: 003345102 2024 59010 009 000 515 059 04 004

Datum izdavanja: 13.01.2025.

Microlife UAB,

P. Lukšić g. 32

08222 Vilnius, Lithuania

Microlife Corporation

9F, No. 431, RuiGuang Road, NeiHu

Taipei 114, Taiwan, China

www.microlife.com

€ 1639