

Kratki vodič - kako postupiti u slučaju nepravilnosti u radu pulsno oksimetra

Poštovani Korisniče,

Pre svega želimo da Vam se zahvalimo što koristite proizvod iz našeg asortimana. Mi želimo da budete srećni sa svojim novim aparatom. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili uočite nepravilnost u radu aparata, molimo Vas da pročitate *Uputstvo za upotrebu* i ovaj kratki vodič sa najčešćim pitanjima i odgovorima. Ukoliko ne uspete da rešite problem, molimo Vas da kontaktirate naš servis.

Kontakt telefon za informacije i reklamacije: 011 4128 286

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Pulsni oksimetar ne prikazuje vrednosti merenja	Baterije u pulsnom oksimetru su prazne	Zamenite baterije
	Baterije nisu pravilno postavljene	Ponovo ubacite baterije. Ukoliko, nakon ponovnog ubacivanja baterija i dalje se ne prikazuju vrednosti merenja kontaktirajte servis za kupce
Displej se ojednom isključi	Proizvod će preći u režim pripravnosti kada se unutar proizvoda ne nalazi signal u trajanju od 5 sekundi	1. Normalno. 2. Promenite baterije.
	Baterije su pri kraju trajanja	Promenite baterije.
Pulsni oksimetar prikazuje prekide u merenjima ili velike skokove vrednosti merenja	Nedovoljno cirkulacije u prstu na kome se vrši merenje	Pogledajte upozorenja i napomene za bezbednost u Odeljku 5
	Prst na kome se treba meriti je suviše veliki ili suviše mali	Vrh prsta mora da ima sledeće dimenzije: Širina između 10 i 22 mm Debljina između 5 i 15 mm
	Prst, šaka ili telo se pomera	Držite prst, šaku i telo u mirnom stanju prilikom merenja
	Srčana aritmija	Potražiti medicinsku pomoć