



Opis

SR

- ① Manžetna
- ② Crevo za manžetnu
- ③ Priključak za manžetnu A
- ④ Priključak za manžetnu B

Izbor konektora

- Za merače krvnog pritiska koji imaju belo, srebrno ili tamno obojenu utičnicu za manžetnu na uređaju, koristite **Priključak za manžetnu A** ③ sa sivim vrhom konektora.

☞ Da biste promenili priključak za manžetnu, izvucite priključak iz creva za manžetnu i ubacite potreban priključak u crevo za manžetnu koliko je moguće duboko.

Čišćenje manžetni

Pažljivo uklonite mrlje sa mažetne vlažnom krpom i sapunicom.

☞ Mehur mora da leži ravno unutar omota manžetne, ne presavijeno

☞ Ne koristite omekšivač za veš.

⚠ **UPOZORENJE:** Ni pod kojim uslovima, ipak, nemojte prati unutrašnji balon!

⚠ Manžete su osetljive i njima se mora pažljivo rukovati.

Garancija

Manžetna ima garanciju na funkcionalnost (čvrstoća balona) u trajanju od 2 godine.

- Nisu obuhvaćeni prsten i kućište manžetne zbog habanja.
- Garancija je validna isključivo uz račun.
- Garancija ne pokriva štetu izazvanu nepravilnim rukovanjem, nezgodama ili odstupanjima od uputstava za upotrebu.

Manžetna ima prosečan vek trajanja od 2 godine ili 5000 merenja, koji god se uslov prvi ispuni.

microlife®

IB 4G M-L cuff-r V32 1622

Revision Date: 2022-04-12

Microlife Rigid Cuff M-L
Catalogue Number: CA5-W0-980



Microlife AG, Espenstrasse 139
9443 Widnau / Switzerland



Microlife UAB
P. Lukšio g. 32
08222 Vilnius
Lithuania

