

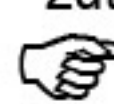
Opis

SR

- ① Manžetna
- ② Crevo za manžetnu
- ③ Priključak za manžetnu A
- ④ Priključak za manžetnu B


Izbor konektora


- Za merače krvnog pritiska koji imaju belo, srebrno ili tamno obojenu utičnicu za manžetnu na uređaju, koristite **Priključak za manžetnu A** ③ sa sivim vrhom konektora.
- Za merače krvnog pritiska koji imaju žuto obojenu utičnicu za manžetnu na uređaju, koristite **Priključak za manžetnu B** ④, sa žutim vrhom konektora.


 Da biste promenili priključak za manžetnu, izvucite priključak iz creva za manžetnu i ubacite potreban priključak u crevo za manžetnu koliko je moguće duboko.


Čišćenje manžetni

1. Uklonite konektor manžetne ③ sa creva za manžetnu ② i pažljivo izvucite mehur kroz otvor na ivici omota manžetne.
2. Ručno operite omot manžetne u sapunici: temperatura ne viša od 30 °C.
3. Potpuno osušite omot manžetne.
4. Provucite crevo za manžetnu kroz otvor i pažljivo vratite mehur ravno u omot manžetne.
5. Povežite konektor manžetne za crevom manžetne.


 Mehur mora da leži ravno unutar omota manžetne, ne presavijeno

 Ne koristite omekšivač za veš.

 **UPOZORENJE:** Nemojte prati manžetu u veš mašini ili mašini za pranje sudova!

 **UPOZORENJE:** Nemojte sušiti omot manžetne u mašini za sušenje veša!

 **UPOZORENJE:** Ni pod kojim uslovima, ipak, nemojte prati unutrašnji balon!

 Manžete su osetljive i njima se mora pažljivo rukovati.

Garancija

Manžetna ima garanciju na funkcionalnost (čvrstoća balona) u trajanju od 2 godine.

- Nisu obuhvaćeni prsten i kućište manžetne zbog habanja.
- Garancija je validna isključivo uz račun.
- Garancija ne pokriva štetu izazvanu nepravilnim rukovanjem, nezgodama ili odstupanjima od uputstava za upotrebu.

Manžetna ima prosečan vek trajanja od 2 godine ili 5000 merenja, koji god se uslov prvi ispuni.

microlife®

IB 4G M-L cuff-s V32 1923
Revision Date: 2023-04-13



Microlife Corporation
9F, 431, RuiGuang Road, NeiHu
Taipei 11492, Taiwan, China



Microlife UAB
P. Lukšio g. 32
08222 Vilnius
Lithuania



Microlife Soft Cuff M-L Catalogue
Number: CA3-W0-975