

## Kratki vodič - kako postupiti u slučaju nepravilnosti u radu kompresorskog inhalatora

Poštovani Korisniče,

Pre svega želimo da Vam se zahvalimo što koristite proizvod iz našeg asortimana. Mi želimo da budete srećni sa svojim novim inhalatorom. Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili uočite nepravilnost u radu inhalatora, molimo Vas da pročitate *Uputstvo za upotrebu* i ovaj kratki vodič sa najčešćim pitanjima i odgovorima. Ukoliko ne uspete da rešite problem, molimo Vas da kontaktirate naš servis.

**Kontakt telefon za informacije i reklamacije: 011 4128 286**

### **NAPOMENA:**

Pre nego sto nastavite dalje, ukoliko utvrdite neku nepravilnost u radu uređaja, proverite status baterija i zamenite ih novim. Ukoliko se problem ponavlja nastavite da čitate tekst u nastavku.

<b>Najčešća pitanja i odgovori</b>	
<b><i>Inhalator radi - čuje se zvuk motora ali nema oslobađanja pare</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je crevo za vazduh pravilno povezano na oba kraja.</li><li>• Proverite da li je crevo za vazduh zgnječeno, savijeno, prljavo ili zapušeno. Ako je potrebno, zamenite ga novim.</li><li>• Proverite da li je čašica za lek pravilno sklopljena i da li se raspršivač (mali delić u oliku klipa ili kišobrana) nalazi pravilno postavljen unutar čašice.</li><li>• Proverite da li je stavljen odgovarajući lek.</li></ul> <p><b>Ako je sve u redu, a i dalje nema oslobađanja pare javite se na telefon za informacije i reklamacije radi popravke aparata.</b></p> <p><b>Ukoliko je čašica oštećena ili nedostaje raspršivač u čašici, javite se na telefon za informacije i reklamacije kako biste nabavili novu čašicu.</b></p>
<b><i>Inhalator ne može da se uključi – ne čuje se zvuk motora</i></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proverite da li je kabl za napajanje pravilno utaknut u utičnicu za struju.</li><li>• Proverite da li je prekidač Uključi/Isključi u poziciji » «.</li><li>• Uređaj se automatski isključuje ukoliko dođe do pregrevanja. Sačekajte da se ohladi i pokušajte ponovo.</li></ul> <p><b>Ako inhalator i posle ovoga ne radi javite se na telefon za informacije i reklamacije radi popravke inhalatora.</b></p>